


Klausos aparatas Klasik

Naudojimosi instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.

Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

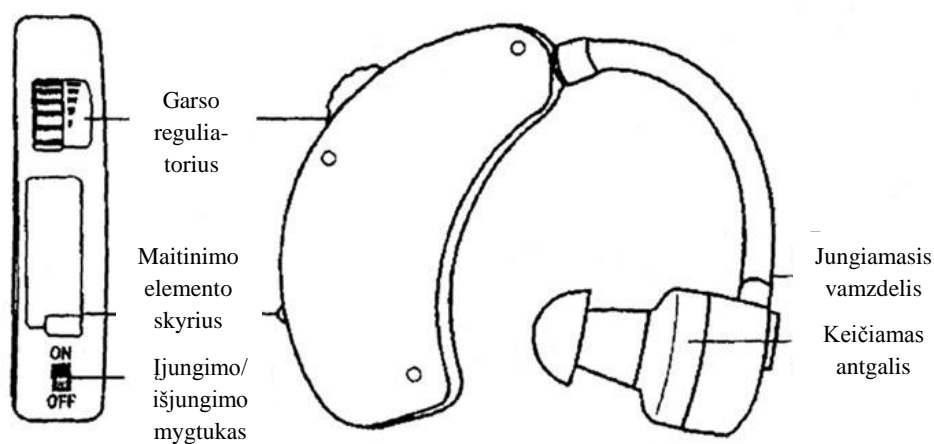

Klausos aparato naudojimas

1. Įsitikinkite, kad maitinimo elementai įdėti teisingai.
2. Nustatykite žemiausią garso stiprumo lygį.
3. Pasirinkite sau tinkamiausią antgalį – jis turi tvirtai laikytis ausyje.
4. Nustatykite norimą garso stiprumo lygį.

Dėmesio!

Įjungto klausos aparato lietimasis rankomis ir kt. gali sukelti garsius švilpiančius garsus.


Klausos aparato įjungimas / išjungimas

ON Jungiklis turi dvi pozicijas – „ON“ ir „OFF“. Naudojimo metu perjunkite jungiklį į poziciją „ON“.




OFF Kai nenaudojate klausos aparata, perjunkite jungiklį į poziciją „OFF“. Tai prailgins maitinimo elemento amžių.

Klausos aparato garso stiprumo reguliavimas

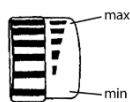

Garso stiprumą Jūs galite reguliuoti sukdami garso stiprumo reguliatorių. Sukant reguliatorių „MAX“ kryptimi, garso lygis kelsis, sukant reguliatorių „MIN“ kryptimi, garso lygis mažės.

Maitinimo elemento keitimas

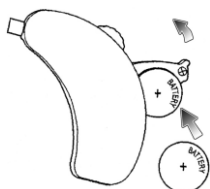

1. Atidarykite maitinimo elemento skyrių kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išimkite išsikrovusį elementą ir įdėkite jauną.
3. Naudokite 1,5V LR-44 tipo maitinimo elementus.

Klausos aparato uždėjimas



Įsitikinkite, kad Jūsų pasirinktas antgalis tvirtai laikosi ausyje ir užkabinkite klausos aparatą už ausies.

Dėmesio!

- Garso lygis didinamas lėtai, išvengiant staigaus garso lygio pakilimo, kuris gali sukelti skausmą ausyje.
- Šis produktas nėra medicininis įtaisas klausos praradimo kompensavimui. Dėl įtaiso naudojimo konsultuokitės su savo gydytoju.
- Jeigu nenaudojate prietaisą ilgą laiką, išjunkite jį ir maitinimo elementai veiks ilgiau.
- Laikykite produktą ir jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Venkite prietaiso sumirkimo ir kitokio kontakto su vandeniu.
- Jeigu prietaisas netyčia sušlapinamas, išjunkite jį ir leiskite visiškai išdžiūti.
- Laikykite prietaisą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Techniniai duomenys

- Elemento veikimo laikas – iki 24 val. (1 vien. LR-44 maitinimo elementas)
- Darbinė srovė — < 8,4 mA
- Darbinė įtampa – nuo 1,0 iki 1,6V
- Svoris su elementu – 10g
- Dažnių diapazonas – 100 ~ 12kHz +/- 6dB
- SSPL – nuo 90db iki 130db
- Harmoningas garso iškrypimas — < 5,3%

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Prietaiso garantija netaikoma:

- Natūraliam prietaiso dalių nusidėvimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
- Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.), atveju.
- Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
- Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
- Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga

Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.

Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Klausos aparatas PROFI

Naudojimosi instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.

Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.



Prietaiso aprašymas



1. Lankstus klausos aparato laikiklis su gumine danga.
2. Įjungimo/išjungimo mygtukas ir garso reguliavimas.
3. Mikrofonas.
4. Indikatorius, kuris užsidega, kada prietaisas yra įjungtas.
5. Silikoninės movos.
6. Elementų skyriaus dangtelis.

Garsas padidinamas pasukant garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę. Patariame Jums nustatyti iš pradžių mažiausią garso stiprumą, ir po to palaipsniui didinti garsą iki norimo lygio.




Klausos aparato naudojimas

1. Įdėkite elementus. Atsižvelkite į elementų poliariškumą.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

2. Pasirinkite silikoninę movą, kuri geriausiai tinka Jūsų ausies kanalui ir uždėkite ją ant klausos aparato (žiūr. Paveikslėlis 1). Mova turi tvirtai laikytis ausyje ir prispausti prie ausies landos sienelių, kitu atveju perduodamas klausos aparatu garsas bus su trikdžiais.
3. Nustatykite prietaiso žemiausio garso lygio režimą. Užsidegs indikatorius (šviesos signalas reiškia, kad prietaisas yra įjungtas).
4. Įdėkite prietaisą į ausies landą. Įsitikinkite, kad yra nustatytas prietaiso žemiausias garso lygis (jeigu prietaiso garso stiprumas bus didesnis negu Jums reikia, Jūs klausite gali būti traumuoti). Nustatykite norimą garso stiprumą sukdami garso reguliavimo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę (3. pav.).
5. Prietaisas yra pritaikytas ir dešinei ir kairei ausiai (žiūr. pav. 4. ir 5.), tiesiog pakeiskite klausos aparato laikiklio stiprinimo kryptį (žiūr. pav. 6.).
6. Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį! Tai prailgins elementų amžių. Apie tai ar prietaisas yra įjungtas ar išjungtas, liudija LED lemputė — jeigu lemputė dega, tai reiškia, kad prietaisas yra įjungtas, jeigu lemputė nedega, tai reiškia, kad prietaisas yra išjungtas.

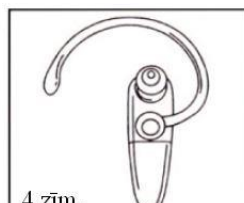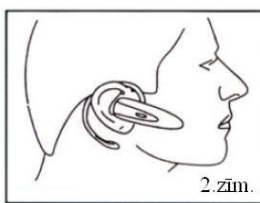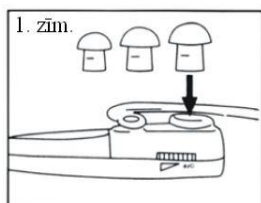

Elementų įdėjimas ir keitimas

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2. Atidarykite elementų skyriaus dangtelį rodyklės nurodyta kryptimi (žiūr. pav. 7.).
3. Įdėkite elementus. Atkreipkite dėmesį į elementų poliariškumą (žiūr. pav. 8.).
4. Uždarykite dangtelį.



Dėmesio!

- Garso lygis didėja lėtai, išvengiant staigaus garso lygio pakilimo, kuris gali sukelti skausmą ausyje.
- Šis produktas nėra medicininis įtaisas klausos praradimo kompensavimui. Dėl įtaiso naudojimo konsultuokitės su savo gydytoju.
- Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį ir maitinimo elementai veiks ilgiau.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

- Laikykite produktą ir jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Venkite prietaiso sumirkimo ir kitokio kontakto su vandeniu.
- Jeigu prietaisas netyčia sušlapinamas, išjunkite jį ir leiskite visiškai išdžiūti.
- Laikykite prietaisą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Techniniai duomenys

- Maksimalus garso lygis — 128dB
- Garso sustiprinimas — >45dB
- Dažnių diapazonas — 200 — 5000Hz
- Jautrumas — <30dB
- Elementai — 2 vien. LR-44
- Darbinė srovė — 6.8mA

Prietaiso garantija netaikoma:

- Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
- Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.), atveju.
- Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
- Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
- Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo naudojimo ar prietaiso perkrovos rezultate.

Aplinkos apsauga



Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.

Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Klausos aparatas MINI


Naudojimosi instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.



Prietaiso aprašymas

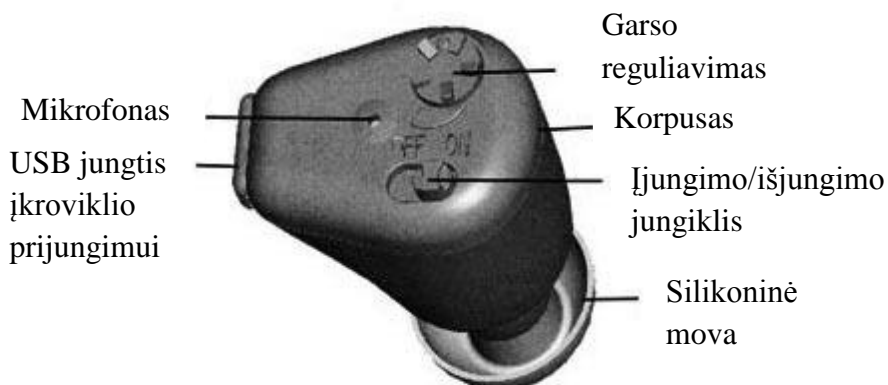

Garso lygį didina sukant garso reguliatorių laikrodžio rodyklės kryptimi. Patariame iš pradžių nustatyti žemiausią garso lygį ir po to palaipsniui didinti garsą iki norimo lygio.

Techniniai duomenys

- Maksimalus garso lygis — 125 +/- 4db
- Garso sustiprinimas — > 38db
- Triukšmo lygis — < 10%
- Dažnių diapazonas — 450 — 3500Hz
- Jautrumas — < 30db
- Akumuliatorius — Ni-MH DC 1,2V
- Darbinė elektros srovė — < 2mA

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

Klausos aparato naudojimas

1. Pasirinkite silikoninę movą, kuri geriausiai tinka Jūsų ausies kanalui ir užmaukite ją ant klausos aparato (žiūr. pav. 1). Mova ausyje turi laikytis tvirtai. Ji turi prispausti prie ausies kanalo sienelių, kitu atveju transliuojamas klausos aparato garsas bus su trukdžiais.
2. Įjunkite klausos aparatą (žiūr. pav. 2).
3. Įdėkite klausos aparatą į ausį (žiūr. pav. 3) ir nustatykite norimą garso lygį.



Paveikslėlis 1



Paveikslėlis 2



Paveikslėlis 3

Dėmesio!

- Garso lygis didėja lėtai, išvengiant staigaus garso lygio pakilimo, kuris gali sukelti skausmą ausyje.
- Šis produktas nėra medicininis įtaisas klausos praradimo kompensavimui. Dėl įtaiso naudojimo konsultuokitės su savo gydytoju.
- Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį ir maitinimo elementai veiks ilgiau.
- Laikykite produktą ir jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Venkite prietaiso sumirkimo ir kitokio kontakto su vandeniu.
- Jeigu prietaisas netyčia sušlapinamas, išjunkite jį ir leiskite visiškai išdžiūti.
- Laikykite prietaisą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Klausos aparato įkrovimas

1. Išjunkite klausos aparatą.
2. Prijunkite įkrovimo kabelį prie klausos aparato.
3. Įkiškite įkrovimo adapterį į rozetę.
4. Įkrovimo metu užsidegs įkrovimo indikatorius raudonos spalvos. Kai raudonos spalvos vietoje užsidegs žalia — akumulatorius bus visiškai įkrautas.
5. Pirmą kartą įkraukite akumuliatorių 8 valandas, visus kitus kartus — 4.

Įkrovimo
adapteris



Įkrovi
mo
indikat
orius



Kabelis

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.


Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

D mesio!

- Ni-MH akumulatoriaus elektrinis talpumas yra 40mAh. Pilnai  krautas klausos aparatas veikia madaug 24 valandas.
- Nenaudokite klausos aparato akumulatoriaus  krovimo metu!

Prietaiso priei ra

1. Reguliariai nuvalykite aus  sier  nuo silikonin s movos komplekte esan iu Őepet liu (i r. pav. 4).
2. Reguliariai nuvalykite silikonin s movos kanal  (i r. pav. 5).

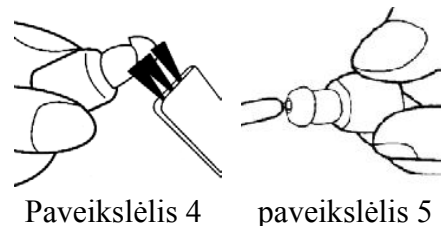

Prietaiso garatija netaikoma:

- Nat raliam prietaiso dali  nusid v jimui, kuris  vyko d l prietaiso ilgalaikio naudojimo.
- Gedim , atsiradusi  d l iŐorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.), atveju.
- Gedim , atsiradusi  d l neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
- Mechaniniams prietaiso paeidimams, kurie atsirado d l kritimo ar panaŐios prieasties.
- Gedim , atsiradusi  d l nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dali  netinkamo naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga



Őis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuot s, reiŐkia, kad prietaiso negalima iŐmesti kartu su kitomis buitini mis atliekomis – j  reikia nugabenti   tam skirt  elektros ir elektronikos  rengini  surinkimo viet .

Teisingai utilizuodami Ői prietais , j s prisid site prie aplinkos ir joje gyvenan i  moni  sveikatos iŐsaugojimo. D l netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir moni  sveikatai. IŐsamesn  informacij  apie Őio prietaiso antrin  panaudojim  gausite savo savivaldyb je, iŐ atliek  tvarkymo  mon s arba parduotuv je, kurioje pirkote Ői prietais .

Pagaminta KLR.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mok tojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausim  ar pretenzij , praŐome raŐyti el. paŐto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendim .